

オートフェースローラー AUTOFACE MTS ROLLER

化粧品を吸収させ弾力と童顔皮膚を完成させるための皮膚美容機器
衛生的に皮膚に自動化アンプル投入皮膚に低刺激



オートフェース5つの効果



皮膚に化粧品
微細吸収



マイクロニードルを
活用した微細刺激



カプセルオートステッド
ダイレクトアンプル伝達



毎日望むコンセプトの
フェースデザイン



微細波動テラピー

オートフェースアンプル

- マルチメソセラピーアンプル(再生)
- ブライティングアンプル
- 水光アンプル(マルチハイドレーションアンプル)
- 輪郭リフティングアンプル

G9ミルクスパピール G9 MILK SPA PEEL

メディカル皮膚管理プログラムプロセス / 効果-抗老化改善、にきび改善、
メラニン抑制、問題性皮膚改善、ニキビダニ除去/3日間の持続的皮


G9は9つの成長因子を含有を
中心に世界的レベルの生物工学技術とたんぱく質を基



80ml



ニキビダニ除去

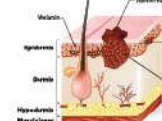

メラニン抑制



マルチハイドレーションアンプル Multi Hydration Ampoule

Hyaluronic Acid / Aloe Barbadensis, Vitamin C
Vitamin E, /Centella Asiatica

新井皮膚を滑らかに、水分たっぷりな皮膚と保湿、鎮定と抗酸化
を維持させるプロフェッショナル処方、プレミアムマルチ水光
ソリューション

メイン成分: ヒアルロン酸、アロエベラ、ビタミンC、ビタミンE、
ビヨンプル抽出物

皮膚管理順



皮膚管理順



皮膚弛緩マッサージ



1. オートフェースアンプルを機器に挿入
2. ローラーチップを機器に装着。
3. スイッチを入れてTIME設定(F-FAST,M-Middle, S-Slow)
4. STARTボタンを押す(短めで押したら最初から開始した後2.5ml使用後停止、長く3秒程度押したら中間部分2.5mlから開始した後、アンプル最後まで到達後停止)
5. 皮膚きめによってローリング



水光アンプル塗布後



マスクパックの上スタンプ管理



再生アンプルG9クリームを塗った後、
日焼け止めクリームを塗布

*ローラーチップは使用前、清潔に衛生的に管理してください(使用前アルコールで軽く沈めた後使用したら衛生的です。)

*参照-電源スイッチを切ってからまたスイッチを入れたら初期化

皮膚管理順



クレンジング



皮膚弛緩マッサージ



1. 皮膚に少量を塗り敏感キャストを行
2. う G9ミルクスパピールを2〜3 gを取って皮膚に塗る(皮膚に塗布した後、軽くラビングする。)
3. 1〜2分(ラビングの際、しっとりした状態のみでラビング、強い刺激は禁止)
4. 塗布した状態で皮膚のきめに沿って軽く押す -皮膚の状態によって5〜10分後



水光アンプル塗布後



マスクパックの上スタンプ管理



再生アンプルG9クリームを塗った後、
日焼け止めクリームを塗布

CIESKIN MTSTーニングスタンプ CIESKIN MTS TONING STAMP

CIESKIN MTSTーニングスタンプ:化粧品を皮膚に吸収させ、
皮膚再生のための皮膚美容機器



微細電流



LED



分当たり8000回
の微細振動



九吸収誘導



低刺激200個のマイクロニードル+マイクロ電気泳動療法+光テラピー+波動
“皮膚に完璧さを与える”

シエスキンMTSスタンプとプレチニウムG9ソリューションと共に使用し、
皮膚に早いソリューション吸収と作用より早い皮膚再生に良いです。



CIESKIN白金G9クリーム
CIESKIN Platinum G9 Cream



CIESKIN白金G9ソリューション
CIESKIN Platinum G9 Solution



プレチニウムG9は9つの成長因子を中心に世界的レベルの
生物工学技術とたんぱく質を基に生産した機能性化粧品



メディカル頭皮脱毛プログラム G9 SCALP SOLUTION BOOSTER

G9スカルプソリューションは、ストレス頭皮に十分な栄養供給と
血液循環を活性化し、健康な頭皮になるような役割をし、
CIESKIN MTSTーニングスタンプと一緒に使用し、より早いソリ
ューション吸収を誘導し頭皮を活性化します。



メイン成分

- 頭皮脱毛に効果的な天然抽出物
- 細胞再生のための9つの成長因子を含む
- 5アルファー還元酵素抑制
- 細胞成長シグナル増加
- ビタミンペプチド 天然キラルス

皮膚管理順



クレンジング



皮膚弛緩マッサージ



1. 皮膚を清潔にした後、スタンプ準備
2. G9ソリューションを塗った後、スタンプを柔らかく皮膚にタッチ(顔全体5~7分)



マルチハイドレーション水光アンブルを
皮膚に塗布



マルクパックをした後、上でスタンプ管理
(水光アンブルの吸収を鎖定管理)



G9クリームを塗った後、日焼け止めク
リーム塗布

* チップは使用前、清潔に衛生的に管理してください。使用前アルコールで軽く沈めた後使用したら衛生的です。

頭皮ケアの順



頭皮クレンジング



頭皮マッサージ及び頭皮リラックス



G9スカルプソリューションブースタを頭皮
に栄養供給(頭皮と7センチ離れたまま頭
皮皮膚表面にまいてください)



CIESKIN MTSTーニングスタンプと
一緒に使用し、より早いソリューション
吸収を誘導し頭皮を活性化します



ヘア整理

U&B

日本の代理店募集

website: www.cieskin.com

TEL: +82-51-305-0052